

Rychlý start

Varování:

Prosím přečtěte si uživatelský manuál pozorně předtím, než použijete tento produkt. Při nevhodném použití může dojít ke zranění.

M

Krok 1

Do nádoby přidejte vlažnou vodu tělesné teploty (+37°C), nebo fyziologický roztok nebo jiné oleje a prostředky doporučené lékařem k čištění uší. Nádobku naplňte vždy před spuštěním zvoleného režimu. Stiskněte tlačítko Mode pro spuštění/výběr režimu.




Krok 2

Když po použití přístroje stále cítíte vodu v uchu:

- 1) zkuste znovu použít program Soft nebo normální program k opětovnému vypláchnutí, aby voda vytekla
- 2) zůstaňte chvíli naklonění tak, aby mohla voda sama vytéct ze zvukovodu.

— 1 —

Popis produktu

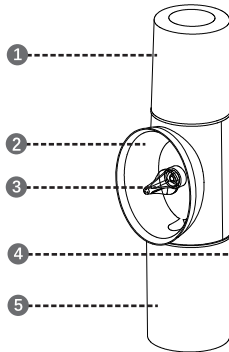

- 1 Nádobka na čistou vodu
- 2 Klapka na ucho
- 3 Vstříkovací tryska
- 4 Zapnout/vypnout - přepnutí
- 5 Nádobka na špinavou vodu

Specifikace

Název - SafeEar - elektrický čistič uší	Čistící programy: 4 stupně
Hlučnost - nízká - méně než 65dB	Doba nabíjení: 3 hodiny
Materiál - ABS	Napětí: DCV5 1A
Kapacita nádoby na vodu - 200 ml	Doba užívání baterie: 60 dní

Čištění a údržba

Čištění: Po použití vylijte zbývající kapalinu v nádrži a otřete suchým ručníkem, umístěte na chladné a větrané místo. Trysku lze dezinfikovat 75% alkoholem, nedezinfikujte při vysoké teplotě a tlaku.

— 2 —

Varování



Výrobek nesmí používat děti do 8 let
Nenechávejte děti používat výrobek samotné, pro bezpečné používání je třeba, aby byly pod dohledem dospělé osoby.

Trysky:
Doporučuje se vyměnit trysky každé 3 měsíce.

Přidávejte do nádoby na vodu jen teplou vodu o teplotě podobné vaší tělesné teplotě nebo o teplotě vody mezi (37 °C + 2 °C) nebo fyziologický roztok nebo jiný lékáři doporučený prostředek k čištění uší.

Pokud máte v uchu zánět nebo trpíte jiným onemocněním uší používejte pouze po poradě s lékařem.

Novým uživatelům se při prvním použití doporučuje používat Soft režim, Soft režim používejte také pokud je vaše ucho velmi citlivé.



Jak se vyhnout zbytkům vody a mazu v uchu?
Pokud máte po použití pocit, že ve zvukovodu zůstává voda:

Zkuste použít Soft/mírný režim nebo normální režim k opětovnému opláchnutí, aby voda vytekla.

— 3 —

Poznámky


Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny, varování a tipy. Nesprávné použití může způsobit zranění osob a poškození majetku.

1. Nepoužívejte tento výrobek, pokud máte jakékoli ušní infekce, perforace bubínku nebo jakékoli poranění ucha.
2. Pokud při používání produktu cítíte jakoukoli bolest, přestaňte ho okamžitě používat.
3. Dětem do 8 let je přísně zakázáno používat tento výrobek. Děti starší 8 let mohou přístroj používat jen pod dohledem dospělé osoby.
4. Tento produkt není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dosah dětí.
5. Tento produkt má vestavěnou baterii, mimo oheň, vlhkost a prostředí s vysokou teplotou, může explodovat v důsledku přehřátí.
6. Když se produkt nepoužívá, zkontrolujte, zda je napájení odpojeno. Při nabíjení prosím tento výrobek nepoužívejte
7. Nepoužívejte vodu nebo čisticí kapalinu na čištění uší o teplotě, která může způsobit opaření, závratě nebo jiné potíže.
8. Nerozebírejte prosím výrobek sami.
9. Náhradní díly produktu a produkt po vypršení platnosti, prosím podle místního zacházení s elektronickými produkty ekologicky zlikvidujte.
10. Nevstříkujte do přístroje chemikálie a pevné látky, jako jsou např. vlasy.
11. Vždy vyčistěte sběrnou nádobku špinavé vody, aby nedošlo k ucpání přístroje.


— 4 —

Instalační kroky


1. Nasadte nádržku na špinavou vodu a poté nainstalujte na horní část zařízení nádobku s čistou vodou.

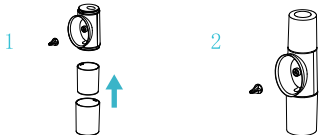


2. Do nádoby na čištění vody v horní části stroje přidejte teplou vodu o teplotě podobné teplotě vašeho těla.

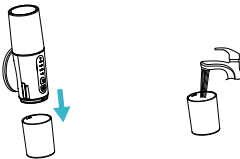

3. Směrem k uchu vyberte režim a poté zapněte přístroj. Po použití vylijte nádobku na špinavou vodu a důkladně přístroj vyčistěte.

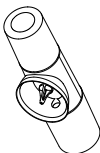

4. Nabíjení - když kontrolka přístroje bliká červeně, otevřete nabíjecí otvor a nabijte jej (normální plné nabití potřebuje 3-5 hodin), dokud se kontrolka baterie nerozsvítí zeleně.

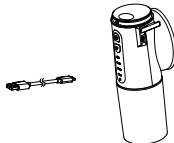

— 5 —

Osobní nastavení síly čištění

Každé osobě vyhovuje jiná síla čištění

Mírný/soft ● ● ●

Mírný tlak vody, jemné čištění doporučeno pro dítě starší 8 let nebo první použití přístroje.

Normální/normal ● ● ● ●


Standardní tlak vody pohodlný pro každodenní čištění.

Silný/strong ● ● ● ● ●

Silný tlak vody, účinné čištění.


Pulzující/Puls ● ● ● ● ● ●

Silné a slabé střídavé hloubkové čištění.

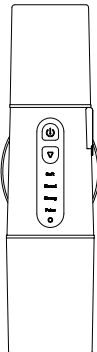

— 6 —

Příslušenství

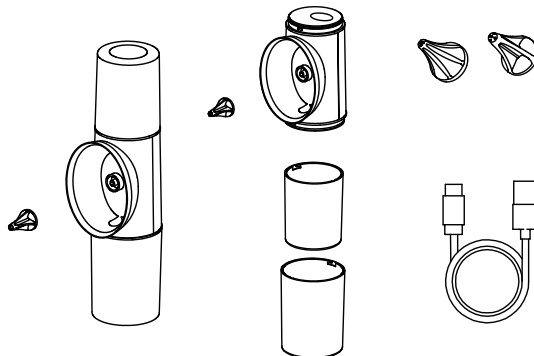


Problém:	Důvod:	Řešení:
Neteče žádná voda, nebo je nedostatečný tlak vody	Nedostatečné nabití nebo ucpání filtru	Nabíjejte včas, vyčistěte nebo vyměňte filtr
Tryska praskla	Silné opotřebení trysky	Nahradte novou tryskou
Nelze spustit zařízení	Motor neběží	Ujistěte se, že je produkt plně nabitý případně kontaktujte zákaznickou podporu
Ostatní problémy		Prosím kontaktujte zákaznickou podporu nebo svého prodejce

RoHS
MADE IN CHINA

— 7 —

Uživatelský manuál

SafeEar - elektrický čistič uší

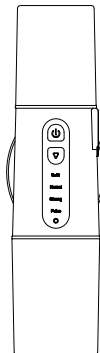

Poznámka:

Přidejte teplou vodu do nádoby na čištění v horní části přístroje.

Voda by měla být tělesné teploty(37°C+-2°C)
Pokud je vaše ucho zanícené, konzultujte použití přístroje se svým lékařem.

— 8 —